

med		Eksempler	Sterilisation/desinfektion	Metode
Intakt hud eller godkendt overtræk	Ikke kritisk	Prænatal ultralyd, ultralyd af indre organer på intakt hud. Vaginal- og rectal ultralyd med godkendt overtræk	Desinfektion med medium antimikrobiel effekt. (svarende til sterilfiltreret alkohol 70-85 % v/v. Evt. egnet forproduceret desinfektions klud)	Desinfektion
Ikke sterile slimhinder	Semikritisk	Vaginal- og rectal ultralyd med ikke godkendt overtræk. TEE	Desinfektion med maksimal antimikrobiel effekt	Rengøring + desinfektion
	Semikritisk (med kritisk delprocedure)	Ultralydsapparat med kanal(er)	Desinfektion med maksimal antimikrobiel effekt	
Sterile hulrum eller sterilt væv	Kritisk	Intraoperabel ultralyd	Sterilisation (Plasma, gas eller damp)	Rengøring + desinfektion+ sterilisation

Anbefalede desinfektionsmidler: PeraSafe®, Cidex®Opa, Tristel Wipes System. Torsten Slotsbjerg og Natasja Hansen 2013